


Carta Fusão Circulos - Manual de Instruções

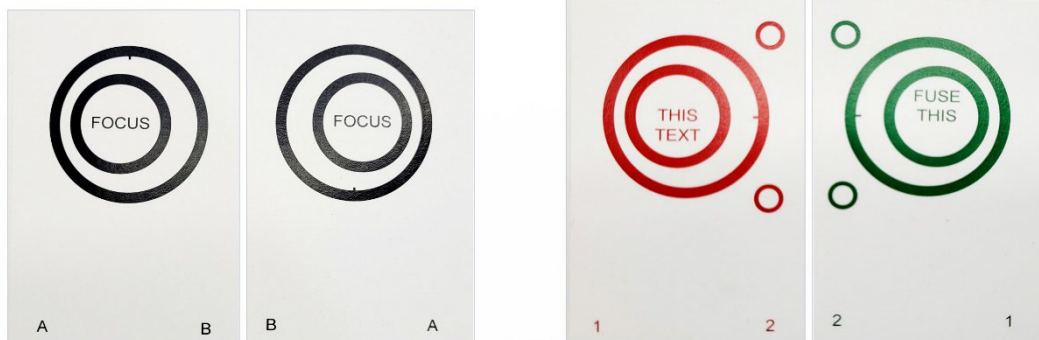

Cartões de Verificação de Supressão e Disparidade de Fixação Modelos 710507 e 710517

1. Finalidade do Produto

Os cartões 710507 e 710517 são utilizados para:

- Detecção de supressão ocular.
- Avaliação de disparidade de fixação.
- Treinamento de vergência (convergência e divergência).
- Estímulo à fusão binocular durante terapias visuais.

2. Conteúdo do Produto

Cada conjunto inclui dois cartões com marcações específicas para testes e treinamento visual. Estão disponíveis em:

- Papel branco opaco
- Plástico transparente

3. Equipamento Necessário

- Óculos com filtros vermelho/verde (não incluídos)

4. Instruções de Uso

4.1. Teste de Supressão Central

Modelo 710507

- Mostre os dois cartões ao paciente, um para cada olho, utilizando óculos vermelho/verde.
- A palavra **FOCUS** deve ser percebida por ambos os olhos.
- Se o paciente não conseguir ver a palavra completa, pode haver supressão ocular em um dos olhos.

Modelo 710517

- A palavra **FUSE** será visível apenas com um olho, **TEXT** com o outro e **THIS** com ambos.
- A percepção correta das três palavras indica ausência de supressão.
- A omissão de uma ou mais palavras sugere supressão monocular.

4.2. Verificação de Disparidade de Fixação

- As pequenas marcas (hash marks) posicionadas nos anéis externos auxiliam na avaliação de desalinhamentos visuais sutis:
 - **710507**: Marca no topo de um cartão e na base do outro.
 - **710517**: Marca à esquerda de um cartão e à direita do outro.
- Oriente o paciente a fundir os anéis.
- Se as marcas parecerem desalinhadas após a fusão, pode haver disparidade de fixação.

4.3. Treinamento de Convergência e Divergência

- Posicione os cartões lado a lado.
- Com óculos vermelho/verde:
 - Se o cartão verde estiver à direita e o filtro verde sobre o olho esquerdo, o paciente deverá realizar **divergência** para fundir as imagens.
 - Inverta a posição dos cartões para treinar **convergência**.
- Oriente o paciente a manter a fusão por alguns segundos e repita conforme necessário.

5. Cuidados e Armazenamento

- Armazene os cartões em local seco, longe da luz solar direta.
- Para versões em plástico, higienize com pano macio e álcool 70%.

- Não dobre ou aplique força excessiva sobre os cartões.

6. Advertências

- Uso exclusivo por profissionais treinados.
- O uso incorreto pode comprometer a eficácia dos testes ou causar desconforto visual.



Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda
Endereço: Av. Fagundes de Oliveira, 964, Bairro: Jardim Padre Anchieta Diadema - SP. CEP: 09950-110 /
CNPJ: 45.198.496/0001-98 Fone:(011) 5011.6736