
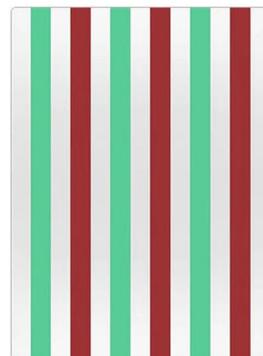
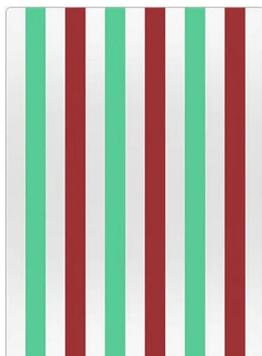


Cartão Antisupressivo - Manual de Instrução

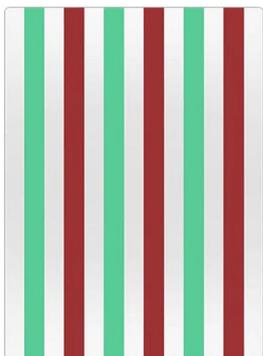

Objetivo:

Estimular a visão binocular e reduzir a supressão ocular em terapias visuais.

Instruções de uso:

1. Posicionamento:

Segure a lâmina a aproximadamente 1 polegada (2,5 cm) acima do texto ou imagem que o paciente irá observar.

2. Exercício:

Peça ao paciente para ler o conteúdo ou descrever a imagem enquanto observa através da lâmina.

- o Olho direito verá apenas as áreas vermelhas.
- o Olho esquerdo verá apenas as áreas verdes.
- o A imagem deve ser percebida de forma completa apenas se ambos os olhos estiverem cooperando.

3. Duração do treino:

Repetir o exercício por 2 a 5 minutos, conforme orientação do profissional responsável.

4. Cuidados com o material:

- o Limpar com álcool isopropílico e pano de microfibra macio.
- o Não utilizar papel toalha ou materiais abrasivos.
- o Armazenar em local seco e plano para evitar deformações.