

Cubo de Lang com Cabo - Manual de Instrução

Objetivo:

Estimular e manter a atenção visual do paciente durante exames de acuidade visual próxima ou terapias visuais, especialmente em crianças.

Instruções de uso:

1. Posicionamento:

Segure o cubo pela haste vermelha e posicione-o a aproximadamente **40 cm (16") de distância** dos olhos do paciente.

2. Fixação visual:

Oriente o paciente a focar nos **optótipos LEA SYMBOLS®** localizados no topo do cubo.

- Comece pelo optótipo central (equivalente a 20/40 ou 6/12).
- Prossiga para o optótipo externo (equivalente a 20/200 ou 6/60), se necessário.

3. Interação lúdica:

Utilize as figuras infantis ao redor do cubo para atrair a atenção e facilitar a cooperação, principalmente com crianças pequenas.

4. Uso durante exames:

Pode ser utilizado durante:

- Testes de acuidade visual monocular e binocular;
- Avaliações de motilidade ocular;
- Sessões de terapia visual com foco em fixação e atenção.

Cuidados e conservação:

- Limpe com pano macio e seco ou levemente umedecido com álcool isopropílico.
- Armazene em local seco e protegido para evitar desgaste das imagens e dos optótipos.

