

# Oclusor Translúcido Pirata - Manual de Instruções

---



## 1. Finalidade do Produto

O **Protetor Ocular Adulto** é indicado para proteção temporária do olho em situações como:

- Pós-operatório oftalmológico
- Traumas oculares
- Procedimentos clínicos e terapêuticos
- Prevenção de toques acidentais ou exposição a agentes externos

---

## 2. Conteúdo da Embalagem

- 3 protetores oculares de plástico
- 3 cordões elásticos para fixação

---

## 3. Especificações Técnicas

- **Dimensões do escudo:** 77 mm (largura) x 53 mm (altura)
- **Material:** Plástico leve, rígido e translúcido
- **Fixação:** Elástico ajustável

---

## 4. Instruções de Uso

### 4.1. Preparação

1. Certifique-se de que o protetor esteja limpo antes do uso.
2. Se necessário, higienize com álcool 70% e pano limpo e seco.
3. Insira o elástico nas laterais do protetor, formando um suporte tipo faixa.

#### **4.2. Aplicação**

1. Posicione o escudo sobre o olho a ser protegido.
2. Passe o elástico ao redor da cabeça, ajustando de modo que o protetor fique firme, mas confortável.
3. Verifique se o escudo não pressiona a área ocular e se está bem centrado.

#### **4.3. Remoção**

1. Retire o elástico da cabeça com cuidado para não causar atrito no olho.
2. Remova o escudo com movimentos suaves.

---

### **5. Cuidados e Armazenamento**

- Armazene em local limpo, seco e protegido da luz direta.
- Não exponha a altas temperaturas ou produtos abrasivos.
- Reutilize somente após adequada higienização.

---

### **6. Advertências**

- Uso exclusivo por adultos.
- Produto não estéril – não utilizar em feridas abertas sem orientação médica.
- Substitua o escudo em caso de rachaduras, deformações ou desgaste do material.
- O uso contínuo deve ser monitorado por profissional da saúde.



Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda  
Endereço: Av. Fagundes de Oliveira, 964, Bairro: Jardim Padre Anchieta  
Diadema - SP. CEP: 09950-110  
CNPJ: 45.198.496/0001-98 Fone: (011) 5011.6736