

# Palito de Fixação – Manual de Instruções

---

## 1. Descrição do Produto

O **Palito Fixação** é uma ferramenta portátil utilizada em exames de visão de curta distância, especialmente eficaz com crianças. Possui estímulos visuais coloridos e testes de supressão vermelho/verde impressos em ambos os lados, promovendo um exame mais envolvente e eficiente.

---

## 2. Finalidade

- Avaliação da **convergência** e **acomodação** visual
  - Medição do **ponto próximo de fixação (near point)**
  - Detecção de **supressão ocular**
  - Estímulo visual em terapias ortópticas e comportamentais
- 

## 3. Conteúdo

- 1 bastão de fixação com figuras ilustrativas infantis
  - Impressão frente e verso com diferentes estímulos visuais
  - Inclui 2 testes de supressão vermelho/verde
- 

## 4. Equipamentos Recomendados

- Óculos com filtros vermelho/verde (não inclusos), para realização dos testes de supressão binocular
- 

## 5. Instruções de Uso

### 5.1. Avaliação de Fixação e Convergência

1. Posicione o bastão na frente do paciente, segurando-o pela extremidade oposta ao estímulo visual.
2. Solicite que a criança fixe o olhar em uma figura específica.
3. Aproxime lentamente o bastão em direção ao nariz do paciente, observando:

- Rompimento da convergência (ponto em que os olhos deixam de convergir corretamente)
- Relato de visão dupla ou desconforto

### **5.2. Avaliação de Acomodação**

1. Peça ao paciente para focar em uma figura do bastão por alguns segundos.
2. Alterne rapidamente a distância do bastão (perto/longe) e observe a capacidade de adaptação visual.
3. Avalie se há dificuldade ou atraso no foco.

### **5.3. Testes de Supressão (com óculos vermelho/verde)**

1. Com os óculos colocados corretamente no paciente (vermelho em um olho, verde no outro), apresente o lado do bastão com os testes de supressão.
2. Solicite que o paciente descreva o que vê.
3. A ausência de um dos estímulos (vermelho ou verde) indica supressão do olho correspondente ao filtro que não identifica a imagem.

---

## **6. Cuidados e Armazenamento**

- Limpar com pano seco ou levemente umedecido com álcool 70%
- Não molhar ou expor a altas temperaturas
- Armazenar em local seco e protegido da luz solar direta

---

## **7. Advertências**

- Produto destinado ao uso por profissionais capacitados da área da saúde ocular
- Não utilizar como brinquedo
- Supervisão obrigatória durante o uso com crianças

filtros vermelho/verde (não inclusos).



filtros vermelho/verde (não inclusos).

Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda

Endereço: Av. Fagundes de Oliveira, 964, Bairro: Jardim

Padre Anchieta Diadema - SP. CEP: 09950-110

CNPJ: 45.198.496/0001-98 Fone: (011) 5011.6736