

Teste Stereo Butterfly / Fly - Manual de Instruções

1. Objetivo do Produto

O **Teste Stereo Butterfly / Fly** é utilizado para avaliação da percepção de profundidade (estereopsia), sendo uma ferramenta essencial na detecção de distúrbios como:

- Estereopsia reduzida
- Ambliopia
- Supressão
- Estrabismo

Pode ser utilizado em **crianças e adultos**, tanto em triagens quanto em exames clínicos completos.

2. Conteúdo da Embalagem

- 1 Livro de Testes **Teste Stereo Butterfly / Fly**
 - 1 Par de Óculos Estereoscópicos (3D Viewers)
 - Gabarito de Respostas (no verso da capa)
 -
-

3. Instruções de Uso

Passo 1 – Preparação do Ambiente

- Garanta iluminação ambiente adequada, sem reflexos diretos sobre o livro de testes.
- Posicione o paciente a aproximadamente **40 cm de distância** do livro.
- Forneça os **óculos estereoscópicos** (lentes polarizadas) ao paciente, certificando-se de que estejam corretamente posicionados.

Passo 2 – Início do Teste

1. Teste da Mosca (Gross Stereopsis)

- Peça ao paciente para “puxar as asas da mosca”.
- Este teste avalia a percepção de profundidade grosseira (~355 a 700 segundos de arco).

2. Teste dos Animais (para Crianças)

- Indicado para crianças pequenas.
- Solicite que identifiquem qual animal "salta" da página (percepção de 400 a 100 segundos de arco).

3. Teste dos Círculos (Fine Stereopsis)

- Apresente as páginas com círculos graduados.
 - Peça ao paciente para identificar qual círculo parece estar “levantado” entre os quatro de cada linha.
 - Avalia percepção fina de profundidade: **800 a 40 segundos de arco**.
 -
-

4. Interpretação dos Resultados

- O paciente deve identificar corretamente os elementos em cada etapa.
 - Erros ou ausência de percepção tridimensional podem indicar alterações visuais.
 - Use o **gabarito** no verso da capa para conferência das respostas corretas.
 -
-

5. Cuidados e Limpeza

- **Não molhar** ou expor o livro de testes à umidade excessiva.
- Para limpeza:
 - Utilize lenços desinfetantes ou pano limpo levemente umedecido com **álcool isopropílico 70%**.

- Não aplique líquidos diretamente no livro ou nos óculos.
 - Armazene em local seco, longe da luz solar direta.
 -
-

6. Advertência

Este produto é um instrumento auxiliar de avaliação visual e **não substitui o exame clínico completo** realizado por um profissional da saúde ocular.



Tecnobrasil Indústria e Comércio Ltda

Endereço: Av. Fagundes de Oliveira, 964, Bairro: Jardim Padre Anchieta Diadema -
SP. CEP: 09950-110

CNPJ: 45.198.496/0001-98 Fone: (011) 5011.6736